

8. Brugsrelaterede risici

- Forkert størrelsesvalg (for stram / for løs)
- Forkert placering (giver ustabil pose eller tryk)
- Forkert placering af urinposen i lommen
- Slange klemmes eller vrides under fiksering
- Brug af slidt/beskadiget holder
- Forkert rengøring af produkt

Risici reduceres gennem korrekt størrelsesvalg, korrekt placering, hudkontrol og regelmæssig inspektion.

Disse risici reduceres gennem korrekt størrelsesvalg, korrekt brug og regelmæssig inspektion.

9. Opbevaring



- Opbevares tørt og rent
- Beskyttes mod direkte sollys og varme
- Opbevares utilgængeligt for små børn, når det ikke er i brug

10. Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Producentoplysninger

Care Design

Se produktmærkning eller emballage for producentens adresse og kontaktoplysninger.

12. Information til fabrikant

Hvis du oplever alvorlig hændelse, i forbindelse med brug af produkt, kontakt da fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret (i Danmark er dette Lægemiddelstyrelsen)



Urinposeholder

Varenummer: 104



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caresign@caresign.dk
www.caresign.dk

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



Urinposeholder - Care Design Varenummer: 104

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra Care Design I/S.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Care Design.

Produktnavn: Urinposeholder
Producent: Care Design I/S
Produktkategori: Medicinsk udstyr
MDR-klassifikation: Klasse I

1. Produktbeskrivelse

CARE® urinposeholdere fra Care Design er kropsbårne tekstilholdere, der bruges til sikker fiksering af urinpose på læggen for kateterbrugere. Designet er lavet, så plastik fra urinposen ikke rører huden, hvilket forbedrer komfort og kan reducere risiko for hudgener.

Den brede elastik sikrer, at urinposen ikke trækker i slangen og medfører ubehag, når der kommer indhold i posen.

Urinposeholderne er fremstillet i 95% bomuld og 5% lycra og materialerne er Øko-TEX certificeret. Størrelser leveres fra XS–XXXL.

2. Tilsigtet anvendelse

Urinposeholderne anvendes til:

- Fiksering og stabil placering af urinpose på læggen. (Henholdsvis højre eller venstre ben)
- Øget tryk ved bevægelse og daglig aktivitet
- Forbedret komfort ved at adskille hud og plastmateriale

Produktet anvendes af:

- Kateterbrugere i hjemmet eller i institutionelle plejemiljøer
- Model 104 er særligt egnet til kørestolsbrugere eller stillesiddende brugere
- Brugere med eller uden assistance fra pårørende eller plejepersonale
- Kan for nogle mindske gener og frustrationer, som opleves i forbindelse med pleje.

3. Indikationer og målgruppe

Urinposeholderne er indiceret til personer med:

- Behov for sikker fiksering af urinpose på benet
- Risiko for at urinposen ellers bevæger sig, generer, eller giver utryghed i hverdagen
- Behov for en mere hudvenlig løsning (hud skal kunne "ånde" og undgå direkte kontakt med plast)

4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Må ikke anvendes på beskadiget hud, åbne sår, tryksår eller ved aktiv hudinfektion uden sundhedsfaglig vurdering.
- Må ikke anvendes ved markante kredsløbsproblemer i benet, hvis fiksering kan forværre tilstanden (vurderes sundhedsfagligt).
- Må ikke anvendes, hvis produktet er beskadiget, væsentligt slidt eller ikke kan fastholde urinposen sikkert.
- Produktet er en fikseringsløsning og er ikke beregnet til medicinsk behandling.

5. Brugsanvisning

5.1 Før brug

- Kontroller at urinposeholderen er ren og intakt.
- Vælg korrekt størrelse for sikker fiksering uden at stramme.

5.2 Påtagning og placering

- Placér urinposeholderen på læggen. (Henholdsvis højre eller venstre ben)
- Indfør urinposen i lommen på urinposeholderen og sørg for, at posen ligger stabilt og ikke vrides.
- Kontroller at slanger ikke klemmes.

5.3 Under brug

- Urinposeholderen skal sidde fast, men komfortabelt.
- Ved ubehag, føleforstyrrelser, misfarvning af hud eller irritation: stop brug og vurder pasform/størrelse.

5.4 Aftagning

- Fjern holderen forsigtigt uden at trække i slange/kateter.
- Inspicer huden for trykmærker eller irritation.







6. Rengøring og vedligeholdelse

- Vaskes i henhold til vaskeanvisningen på produktets mærkat.
- Produktet skal være helt tørt før genbrug eller opbevaring.
- Inspicer regelmæssigt for slid i stoff/elastik og nedsat fikseringsevne.

7. Advarsler og forholdsregler

- Anvend altid korrekt størrelse (for stram fiksering kan give ubehag/tryk).
- Produktet må ikke anvendes ved defekte syninger eller hvis fiksering ikke er sikker.
- Produktet må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse: fiksering af urinpose.

Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning