

8. Brugsrelaterede risici

Forudsigtelig forkert brug omfatter:

- Manglende lukning af trykknapper
- Forkert størrelsesvalg
- Brug af beskadiget eller slidt produkt
- Forkert rengøring af produktet

Disse risici reduceres gennem korrekt størrelsesvalg, korrekt brug og regelmæssig inspektion.

9. Opbevaring



- Opbevares tørt og rent
- Beskyttes mod direkte sollys og varme
- Opbevares utilgængeligt for små børn, når det ikke er i brug

10. Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Producentoplysninger

Care Design

Se produktmærkning eller emballage for producentens adresse og kontaktoplysninger.

12. Information til fabrikant

Hvis du oplever alvorlig hændelse, i forbindelse med brug af produkt, kontakt da fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret (i Danmark er dette Lægemiddelstyrelsen)



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caredesign@caredesign.dk
www.caredesign.dk

Undertrøje med tryklukning

Varenummer: 201

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Undertrøje - Care Design Varenummer: 201

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra Care Design I/S.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Care Design.

Produktnavn: Undertrøje med trykknapper

Producent: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinsk udstyr

MDR-klassifikation: Klasse I

1. Produktbeskrivelse

Undertrøjer med trykknapper fra Care Design er funktionelle undertrøjer designet med trykknapper ned midtfor foran, som muliggør nem og skånsom på- og aftagning. Produktet er udviklet med fokus på komfort, funktionalitet og værdighed og er særligt velegnet til brug i pleje- og omsorgssituationer.

Produkt kan fås i en herremodel og en damemodel.

Produkt kan fås i forskellige størrelser.

Materiale er økotex- certificeret 95% bomuld/5 % lycra samt trykknapper.

2. Tilsigtede anvendelse

Undertrøjerne anvendes som daglig beklædning til:

- Komfort og varme
- Lettere på- og aftagning ved personlig pleje
- Reduceret fysisk belastning for bruger og plejepersonale
- Kan for nogle mindske gener og frustrationer som opleves i forbindelse med pleje.

Produktet er beregnet til brug af børn og voksne med eller uden assistance fra pårørende eller plejepersonale, i private hjem og institutionelle plejemiljøer.

3. Indikationer og målgruppe

Undertrøjen med tryklukning fortill er fremstillet til gigtpatienter eller til personer med funktionsnedsættelse af andre årsager.

Undertrøjen er indiceret til personer med:

- Nedsat mobilitet
- Begrænset arm- eller skulderfunktion
- Behov for beklædning, der kan tages af og på uden fuld overkropsafklædning
- Behov for forenklet håndtering i plejesituationer

4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Produktet må ikke anvendes på beskadiget hud, åbne sår eller ved hudinfektioner uden forudgående sundhedsfaglig vurdering.
- Produktet har ingen terapeutisk eller absorberende funktion.
- Må ikke anvendes, hvis trykknapper eller materiale er beskadiget eller væsentligt slidt.

5. Brugsanvisning

5.1 Før brug

- Kontroller, at undertrøjen er ren og intakt.
- Væg korrekt størrelse for optimal pasform og komfort.
- Læs denne brugsanvisning inden første anvendelse.

5.2 Påtagning

1. Åbn alle trykknapper.
2. Placer undertrøjen omkring overkroppen i korrekt position.
3. Luk trykknapperne
4. Sørg for, at undertrøjen sidder tæt, men komfortabelt, uden at stramme.

5.3 Under brug

- Undertrøjen kan bæres i dagligdagen og om natten efter behov.
- Ved ubehag, hudirritation eller forkert pasform skal brugen ophøre.

5.4 Aftagning

- Åbn trykknapperne forsigtigt.
- Fjern undertrøjen uden at belaste brugerens skuldre, arme eller hud.







6. Rengøring og vedligeholdelse

- Vaskes i henhold til vaskeanvisningen på produktets mærkat.
- Produktet skal være helt tørt før genbrug eller opbevaring.
- Inspicer regelmæssigt for slid på stof, sømme og trykknapper.

7. Advarsler og forholdsregler

- Anvend altid korrekt størrelse.
- Trykknapper skal være korrekt lukkede før brug.
- Fortsat brug af slidt produkt kan nedsætte funktion og komfort.
- Produktet må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse beskrevet i denne brugsanvisning.

Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning