

### 8. Brugsrelaterede risici

Forudsigtelig forkert brug omfatter:

- Manglende lukning af trykknapper
- Trykknapper eller lynlåse svigter under brug
- Forkert størrelsesvalg
- Hudirritation
- Brug af beskadiget eller slidt produkt
- Forkert rengøring af produktet

Disse risici reduceres gennem korrekt størrelsesvalg, korrekt brug og regelmæssig inspektion.

### 9. Opbevaring

- Opbevares tørt og rent
- Beskyttes mod direkte sollys og varme
- Opbevares utilgængeligt for små børn, når det ikke er i brug

### 10. Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

### 11. Producentoplysninger

Care Design

Se produktmærkning eller emballage for producentens adresse og kontaktoplysninger.

### 12. Information til fabrikant

Hvis du oplever alvorlig hændelse, i forbindelse med brug af produkt, kontakt da fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret (i Danmark er dette Lægemiddelstyrelsen)



## Bodystockings

Produktgruppe: Bodystockings



**CARE® Design**

Englandsvej 8

5700 Svendborg-DK

Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: [caredesign@caredesign.dk](mailto:caredesign@caredesign.dk)

[www.caredesign.dk](http://www.caredesign.dk)

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



## Care Design produktgruppe: Bodystockings

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra Care Design I/S.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Care Design.

Produktgruppe: Bodystockings

Producent: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinsk udstyr

MDR-klassifikation: Klasse I

### 1. Produktbeskrivelse

Bodystockings fra Care Design er specialudviklet beklædning med lukninger (trykknapper og lynlåse), der er designet til at give komfort, støtte og fastholdelse af evt. inkontinensprodukter. Produktet er udviklet til at lette på- og aftagning samt pleje i hverdagen og bidrage til øget værdighed for brugeren.

Produkterne er uni-sex modeller og kan derfor anvendes af både mænd og kvinder.

Materialerne er økotex-certificeret og dermed meget hudvenlige og behagelige at anvende.

Stoffet er henholdsvis 95% bomuld/5% lycra og 100% bomuld.

### 2. Tilsigtet anvendelse

Bodystockings anvendes som dagligt beklædningsprodukt til:

- Komfort og varme
- Fastholdelse af inkontinensprodukter
- Lettere på- og aftagning i plejesituationer
- Beskytte mod at gøre skade på sig selv hos borgere med særlige behov
- Kan for nogle mindske gener og frustrationer som opleves i forbindelse med pleje.

Produktet anvendes af:

- Børn og voksne med inkontinens
- Brugere med eller uden assistance fra pårørende eller plejepersonale i private hjem og institutionelle plejemiljøer.

### 3. Indikationer og målgruppe

Bodystockings er indiceret til personer med:

- Nedsat mobilitet
- Behov for støtte til fastholdelse af beklædning eller inkontinensprodukter
- Behov for lettere håndtering ved personlig pleje
- Særlige behov for ikke ubevidst at gøre skade på sig selv (kradsning, fjernelse af katerer, sonde, fjernelse af ble mm)

### 4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Produktet må ikke anvendes på beskadiget hud eller åbne sår uden sundhedsfaglig vurdering.
- Produktet er ikke beregnet til medicinsk behandling eller absorption af væsker. Må ikke anvendes, hvis produktet er beskadiget eller væsentligt slidt.

### 5. Brugsanvisning

#### 5.1 Før brug

- Kontroller, at bodystocking er ren og intakt.
- Vælg korrekt størrelse for optimal pasform og komfort.
- Læs denne brugsanvisning inden første anvendelse.

#### 5.2 Påtagning

- Åbn alle lukninger (trykknapper, lynlåse).
- Tag bodystocking på som almindeligt undertøj, alt efter hvor åbningen er.
- Luk trykknapper og lynlåse i korrekt rækkefølge.
- Sørg for, at produktet sidder tæt, men komfortabelt, uden at stramme.

#### 5.3 Under brug

- Produktet kan bæres i dagligdagen og om natten, alt efter behov.
- Ved ubehag, hudirritation eller forkert pasform skal brugen ophøre.

#### 5.4 Aftagning

- Åbn lukningerne forsigtigt (trykknapper, lynlåse)
- Fjern bodystocking uden at belaste brugerens led eller hud.







### 6. Rengøring og vedligeholdelse

- Vaskes i henhold til vaskeanvisningen på produktets mærkat.
- Produktet skal være helt tørt før genbrug eller opbevaring.
- Inspicer regelmæssigt for slid på stof, sømme og lukninger.

### 7. Advarsler og forholdsregler

- Anvend altid korrekt størrelse.
  - Produktet må ikke anvendes, hvis lukninger eller sømme er beskadiget.
  - Fortsat brug af slidt produkt kan nedsætte funktion og komfort.
- Produktet må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse.

### Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning