

### 8. Brugsrelaterede risici

Forudsigtelig forkert brug omfatter:

- Betrækket er revnet eller perforeret pga slitage
- Svejsningen i sømmene er mangelfuld så det ikke er tæt
- Forkert lagt på så det ikke er tæt
- Forkert størrelsesvalg
- Brug af beskadiget eller slidt produkt
- Hudirritation ved sart hud

Disse risici reduceres gennem korrekt størrelsesvalg, korrekt brug og regelmæssig inspektion.

### 9. Opbevaring

- Opbevares tørt og rent
- Beskyttes mod direkte sollys og varme
- Opbevares utilgængeligt for små børn, når det ikke er i brug

### 10. Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

### 11. Producentoplysninger

Care Design

Se produktmærkning eller emballage for producentens adresse og kontaktoplysninger.

### 12. Information til fabrikant

Hvis du oplever alvorlig hændelse, i forbindelse med brug af produkt, kontakt da fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret (i Danmark er dette Lægemiddelstyrelsen)



**CARE® Design**

Englandsvej 8

5700 Svendborg-DK

Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: [caredesign@caredesign.dk](mailto:caredesign@caredesign.dk)

[www.caredesign.dk](http://www.caredesign.dk)

## Bed Cover Pro

Produktgruppe: Bed Cover Pro

40x45 cm, 60x63cm, 100x140cm, 140x200cm



## Bed Cover Pro - Care Design Produktgruppe: Dyne- og pudebeskyttelse

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra Care Design I/S.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Care Design.

Produktnavn: Bed Cover Pro  
Producent: Care Design I/S  
Produktkategori: Medicinsk udstyr  
MDR-klassifikation: Klasse I

### 1. Produktbeskrivelse

Dynebeskyttelse er en ultralet, væsketæt og åndbar beskyttelsesbetræk, som trækkes over dynen før sengelinned, for at beskytte mod væskeudslip. Pudebeskyttelse er samme type produkt for pude. Begge er fremstillet med en polyester-polyurethanmembran, som kan vaskes ved høj temperatur og tørretumbles uden at miste væsketæthed.

Pude- og dynebeskyttelse kan fås i 2 forskellige størrelser hver. Henholdsvis Junior- og Seniorstørrelse.

Materialet er Økotex-certificeret og dermed meget hudvenligt at anvende.

### 2. Tilsigtet anvendelse

Produkterne anvendes som hygiejnisk beskyttelse af hovedpude og dyne ved:

- Forebyggelse af væskeindtrængning i pude og dyne
- Reduktion af vask af pude og dyne og dermed hygiejneressourcer
- Forbedret pleje og komfort i daglig brug

Kan anvendes af plejegrævende brugere med eller uden assistance fra plejepersonale i private hjem, plejehjem og institutioner.

Kan for nogle mindske gener og frustrationer, som opleves i forbindelse med pleje.

### 3. Indikationer og målgruppe

Indiceret til personer med:

- Risiko for væskeudslip (inkontinens, opkast, væskespild)
- Behov for hygiejnisk sengemiljø
- Reduceret evne til at beskytte sengetøj mod væsker

### 4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Produktet er ikke et absorberende hjælpemiddel (kan ikke erstatte inkontinensprodukter).
- Må ikke anvendes på beskadigede tekstiler eller hvis materialet er revnet eller defekt.
- Må ikke bruges til medicinsk behandling eller væskeopsamling.

## 5. Brugsanvisning

### 5.1 Før brug

- Kontroller, at produktet er rent og uden synlige skader.
- Vælg korrekt størrelse.

### 5.2 Anvendelse

- Træk beskyttelsesbetrækket helt over dyne/pude.
- Læg almindeligt sengelinned uden på.

### 5.3 Under brug

- Produktet kan bruges kontinuerligt efter behov.
- Stop brug ved ubehag eller beskadigelse.

### 5.4 Aftagning

- Fjern betrækket forsigtigt uden at spilde væske på underlaget.

### 6. Rengøring og vedligeholdelse







- Maskinvaskes efter vaskeanvisning (op til 95 °C).
- Tørretumbles ved op til 120 °C.
- Afsprittes
- Inspicer jævnligt for svækkelser i stof, sømme eller membran.



### 7. Advarsler og forholdsregler

- Brug kun til den tilsigtede funktion som beskyttelse af pude og dyne.
- Fortsat brug af beskadiget produkt kan medføre manglende væsketæthed.
- Undgå vaskemidler eller metoder, der beskadiger membranen. Anbefales at vaske uden brug af skyllemiddel.

### Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning