

8. Brugsrelaterede risici

Forudsigtelig forkert brug omfatter:

- Forkert størrelsesvalg
- Brug af beskadiget produkt

Disse risici reduceres gennem korrekt størrelsesvalg, korrekt brug og regelmæssig inspektion.

9. Opbevaring



- Opbevares tørt og rent
- Beskyttes mod direkte sollys og varme
- Opbevares utilgængeligt for små børn, når det ikke er i brug

10. Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes som almindeligt restaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Producentoplysninger

Care Design

Se produktmærkning eller emballage for producentens adresse og kontaktoplysninger.

12. Information til fabrikant

Hvis du oplever alvorlig hændelse, i forbindelse med brug af produkt, kontakt da fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret (i Danmark er dette Lægemiddelstyrelsen)



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caredesign@caredesign.dk
www.caredesign.dk

CARE® Design

Brugsanvisning



Badebleer / svømmebleer

Varenummer: Swim-MED

S, M, L, XL, XXL



Badebleer / svømmebleer - Care Design varenummer: Swim-Med

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra Principle Business Enterprises.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Care Design.

Produktnavn: Swim-Med

Producent: Principle Business Enterprises:

20189 Pine Lake Road, Bowling Green, OH 43402, P.O. Box 129 Dunbridge, OH 43414, USA

Produktkategori: Medicinsk udstyr

MDR-klassifikation: Klasse I

1. Produktbeskrivelse

Swim-Med er en badeble til personer med inkontinens. Produktet er udviklet til brug ved svømning og vandaktiviteter og har til formål at reducere risikoen for utilsigtet udslip af urin og afføring under ophold i vand.

Der er en barriere på ydersiden, der sikrer at badebleen ikke suger væske udefra og derfor ikke øger dets volumen under vandaktiviteter.

Der er en blå kant i taljen, der indikerer at det er bagsiden af badebleen.

Latexfri. Kan bruges af både mænd og kvinder.

2. Tilsigtet anvendelse

Swim-Med anvendes som badeble ved:

- Svømning
- Vandtræning
- Ophold i svømmehal eller lignende miljøer

Øger trykgheden under vandaktivitet, da badebleen sikrer at hverken urin eller afføring kan komme ud i vandet.

Beskytter badetøjet som anbefales at anvende udover badebleen.

Produktet anvendes af:

- Børn og voksne med inkontinens
- Brugere med eller uden assistance fra pårørende eller plejepersonale

3. Indikationer

Swim-Med er indiceret til brug for personer med urin- og afføringsinkontinens og som ønsker at deltage i vandaktiviteter på en hygiejnisk og værdig måde.

4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Produktet er ikke beregnet til at anvende som erstatning for inkontinensprodukter uden for vand.
- Må ikke anvendes ved åbne sår eller hudinfektioner i det dækkede område uden forudgående vurdering.
- Produktet er ikke beregnet til kontinuerlig brug uden for vandaktiviteter.

5. Brugsanvisning



5.1 Før brug

- Kontroller at Swim-Med er intakt og uden synlige skader.
- Vælg korrekt størrelse for at sikre optimal pasform og tæthed.
- Sørg for, at produktet er rent og tørt før brug.

5.2 Påtagning

- Tag Swim-Med på som en almindelig bukseble eller underbukser.
- Sørg for, at elastikker i talje og ben sidder tæt, men komfortabelt.
- Kontroller, at produktet slutter korrekt til kroppen uden folder.

5.3 Under brug

- Produktet skal bæres under hele opholdet i vand.
- Ved ubehag eller forkert pasform skal brugen ophøre, og produktet justeres eller udskiftes.
- Opsyn anbefales ved brug hos børn eller personer med nedsat funktionsevne.

5.4 Efter brug

- Fjern Swim-Med umiddelbart efter vandaktivitet.
- Swim-Med er en engangs badeble og skal derfor kasseres efter endt vandaktivitet.
- Kasseres i almindelig restaffald.

6. Rengøring og vedligeholdelse

- Swim-Med er en engangs badeble og skal derfor kasseres efter endt vandaktivitet.
- Kasseres i almindelig restaffald.
- Derfor ingen rengøring eller vedligeholdelse.

7. Advarsler og forholdsregler



- Anvend altid korrekt størrelse for at sikre tæthed og funktion.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget eller slidt.
- Swim-Med reducerer risiko for udslip, men kan ikke garantere fuldstændig tæthed under alle forhold.
- Må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse beskrevet i denne brugsanvisning.

Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning