

Rengøring og vedligehold

- Skånevask ved 30 °C
- Må ikke bleges
- Må ikke tørretumbles
- Må ikke stryges
- Må ikke kemisk renses
- Ingen skyllemiddel
- Trækkes i form og lufttørres
- Beskyttes mod direkte sollys og varme



Levetid

Produktets forventede levetid afhænger af naturligt slid ved korrekt og indiceret brug

Indberetning af alvorlige hændelser (Vigilance)

Enhver alvorlig hændelse eller forværring af helbrestilstand i forbindelse med anvendelse af produktet skal indberettes til:

- Distributør eller fabrikant
- Relevant national kompetent myndighed (I Danmark: Lægemiddelstyrelsen)

Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregler efter endt brug.

Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Aktuel overensstemmelseserklæring forefindes hos producenten.

Dansk distributør

CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caresign@caresign.dk
www.caredesign.dk



BORT Medical GmbH

Am Schweizerbach 1
71384 Weinstadt-Benzach-DE
Telefon: +49 - 71 51 - 9 92 00 - 0

E-mail: medical@bort.com
www.bort.com



Knæ senestrop til sport

Varenummer: 114010SP

Omkreds lige under knæskallen: op til 34 cm, omkreds lige under knæskallen: 34-41 cm,
omkreds lige under knæskallen: 41-48 cm

BORT Patella-senebånd Sport - Care Design varenummer: 114010SP

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra BORT GmbH. 

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din læge eller den specialforretning, hvor du har købt produktet.

Formål

Dette medicinske udstyr er en patella-senebandage, der aflaster knæskallen ved at lægge tryk på knæleddets strækkesene.

Medicinsk udstyr – klasse I

Én patient – flerbrug

Indikationer

Chondropathia patellae (løberknæ).

Femoropatellar artrose (slidgigt i knæet).

Patellaspitssyndrom (springerknæ).

Kontraindikationer

Risiko for trombose, svær varikose (åreknuder), perifer arteriel sygdom (PAD), forstyrrelser i lymfedrænen, herunder uklare hævelser i bløddele fjernet fra bandagen, følelses- og kredsløbsforstyrrelser i det behandlede område samt hudsygdomme i den behandlede kropsdel.

Anvendelsesrisici / Vigtige bemærkninger



Valg af korrekt størrelse og instruktion gives af fagfolk.

Tag bandagen af før radiologiske undersøgelser (f.eks. røntgen).

Tag bandagen af ved længere hvileperioder, f.eks. under søvn.

Ved følelsesløshed skal bandagen løsnes eller tages af.

Kontakt læge eller specialforretning ved vedvarende gener.

Brug kun andre produkter samtidigt efter aftale med lægen.

Foretag ingen ændringer på produktet, og brug det ikke på åbne sår.

Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for de anvendte materialer.

Kun til én patient: Bandagen er kun beregnet til behandling af én enkelt patient og må ikke genbruges til andre.

Undgå brug af cremer eller salver under bandagen, da det kan ødelægge materialet.

Vejledning i påtagning

Åbn båndet helt og placer trykpolstret på patellaseten direkte under knæskallen.

Før båndet rundt om benet og luk velcrolukningen med det ønskede træk, så der udøves tilstrækkeligt tryk på patellaseten uden at det hæmmer blodcirkulationen.

Aftagning

Løs velcrolukningen og tag bandagen af benet.

Materialesammensætning

Polyamid (PA), elastan (EL), viskose (CV), polyester (PES), bomuld (CO). Den præcise sammensætning fremgår af det isyede vaskemærke.

Rengøring

Skånevask ved 30 °C.

Må ikke bleges, stryges eller renses kemisk.

Må ikke tørretumbles.

Brug ikke skyllemiddel. Træk produktet i form og lad det lufttørre.

Garanti og levetid

Lovbestemte garantier i købslandet gælder. Produktets levetid afhænger af naturligt slid ved korrekt brug. Ved reklamation skal produktet rengøres før indlevering. Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre, at garantien bortfalder.

Oplysningspligt

Hvis der opstår en alvorlig forværring af dit helbred under brug, skal du informere din forhandler eller producenten samt de nationale sundhedsmyndigheder.

Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning