

8. Brugsrelaterede risici

Forudsigtelig forkert brug omfatter:

- Sømme eller elastikker giver lokalt tryk
- Forkert pasform eller størrelsesvalg
- Hudirritation
- Brug af beskadiget eller slidt produkt
- Forkert rengøring af produktet

Disse risici reduceres gennem korrekt størrelsesvalg, korrekt brug og regelmæssig inspektion.

9. Opbevaring



- Opbevares tørt og rent
- Beskyttes mod direkte sollys og varme
- Opbevares utilgængeligt for små børn, når det ikke er i brug

10. Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Producentoplysninger

Care Design

Se produktmærkning eller emballage for producentens adresse og kontaktoplysninger.

12. Information til fabrikant

Hvis du oplever alvorlig hændelse, i forbindelse med brug af produkt, kontakt da fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret (i Danmark er dette Lægemiddelstyrelsen)



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caresign@caresign.dk
www.caredesign.dk

CARE® Design

Brugsanvisning



Trusser

Produktgruppe: Trusser

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



Trusser - Care Design produktgruppe: Trusser

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra Care Design I/S.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Care Design.

Produktgruppe: Trusser

Producent: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinsk udstyr

MDR-klassifikation: Klasse I

1. Produktbeskrivelse

Trusser fra Care Design er udviklet som funktionelt beklædningsprodukt til daglig brug. Produktet er designet med fokus på komfort, pasform og hygiejne og kan anvendes alene eller til fastholdelse af inkontinensprodukter. Trusserne er velegnede til brug i både private hjem og institutionelle plejemiljøer.

Trusserne kan fås i en herremodel (806) og en damemodel (802, 805, 808)

Trusserne kan fås i forskellige størrelser.

Materialerne er økotex-certificeret og stoffet er 95% bomuld/5% lycra.

2. Tilsigtet anvendelse

Trusserne anvendes til:

- Daglig beklædning
- Komfort og beskyttelse
- Fastholdelse af evt. inkontinensprodukter

Produktet anvendes af voksne og/eller børn, med eller uden assistance fra plejepersonale.

3. Indikationer

Trusserne er indiceret til personer med behov for:

- Komfortabel og hudvenlig beklædning
- Stabil fastholdelse af inkontinensprodukter
- Enkle løsninger til daglig på- og aftagning

4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Produktet må ikke anvendes på beskadiget hud, åbne sår eller ved hudinfektioner uden forudgående sundhedsfaglig vurdering.
- Produktet er ikke absorberende og erstatter ikke inkontinensprodukter. (Model 808 har en absorberende sugesevne på 90 ml)
- Må ikke anvendes, hvis produktet er beskadiget eller væsentligt slidt.

5. Brugsanvisning

5.1 Før brug

- Kontroller, at trusserne er rene og intakte.
- Vælg korrekt størrelse for optimal pasform og komfort.
- Læs denne brugsanvisning inden første anvendelse.

5.2 Påtagning

- Tag trusserne på som almindeligt undertøj.
- Sørg for, at de sidder tæt, men komfortabelt, uden at stramme.
- Hvis inkontinensprodukt anvendes, placeres dette korrekt før påtagning.

5.3 Under brug

- Trusserne kan bæres i dagligdagen og om natten efter behov.
- Ved ubehag, hudirritation eller forkert pasform skal brugen ophøre.
- Opsyn anbefales ved brug hos personer med nedsat funktionsevne.

5.4 Aftagning

- Trusserne tages af som almindeligt undertøj.
- Undgå unødigt belastning af hud og led ved aftagning.

6. Rengøring og vedligeholdelse

- Vaskes i henhold til vaskeanvisningen på produktets mærkat.
- Produktet skal være helt tørt før genbrug eller opbevaring.
- Inspicer regelmæssigt for tegn  i slid, særligt ved elastikker og sømme.

7. Advarsler og forholdsregler

- Anvend altid korrekt størrelse.
- Fortsat brug af slidt produkt kan reducere komfort og funktion.
- Produktet må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse beskrevet i denne brugsanvisning.

Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning