

8. Brugsrelaterede risici

Forudsigtelig forkert brug omfatter:

- Manglende lukning af trykknapper
- Forkert størrelsesvalg
- Brug af beskadiget eller slidt produkt
- Forkert rengøring af produktet

Disse risici reduceres gennem korrekt størrelsesvalg, korrekt brug og regelmæssig inspektion.

9. Opbevaring



- Opbevares tørt og rent
- Beskyttes mod direkte sollys og varme
- Opbevares utilgængeligt for små børn, når det ikke er i brug

10. Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Producentoplysninger

Care Design

Se produktmærkning eller emballage for producentens adresse og kontaktoplysninger.

12. Information til fabrikant

Hvis du oplever alvorlig hændelse, i forbindelse med brug af produkt, kontakt da fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret (i Danmark er dette Lægemiddelstyrelsen)



CARE® Design

Englandsvej 8

5700 Svendborg-DK

Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caresign@caresign.dk

www.caredesign.dk



Støtte BH

Varenummer: 905, 906, 908 og 909

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Støtte BH - Care Design Varenummer: 905, 906, 908 og 909

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra Care Design I/S.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Care Design.

Produkt navn: Støtte BH

Producent: Care Design I/S

Produkt kategori: Medicinsk udstyr

MDR-klassifikation: Klasse I

1. Produktbeskrivelse

Støtte-BH fra Care Design er et specialudviklet beklædningsprodukt designet til at give stabil støtte, komfort og korrekt placering af brysterne. Produktet er udviklet med fokus på brugere med nedsat funktionsevne, postoperative behov eller gener, hvor almindelige BH'er er vanskelige at anvende. Støtte-BH'en er udstyret med funktionelle lukninger, der letter på- og aftagning og understøtter daglig pleje og værdighed.

Støtte BH fås med eller uden trykknapper.

Støtte BH fås i hvid eller sort.

Materiale er økotex-certificeret 95% bomuld/5% lycra.

2. Tilsigtet anvendelse

Støtte-BH anvendes som dagligt beklædningsprodukt til:

- Støtte og stabilisering af brysterne
- Øget komfort i hverdagen
- Lettere på- og aftagning ved behov for hjælp

Produktet anvendes af:

- Voksne brugere
 - Brugere med eller uden assistance fra pårørende eller plejepersonale
- Anvendelse sker i private hjem og institutionelle plejemiljøer.

Kan for nogle mindske gener og frustrationer, som opleves i forbindelse med pleje.

3. Indikationer og målgruppe

Støtte-BH er indiceret til personer med:

- Nedsat mobilitet eller styrke
- Behov for ekstra støtte til brysterne
- Behov for et funktionelt alternativ til almindelig BH
- Postoperative eller plejerelaterede behov (uden behandlende formål)

4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Må ikke anvendes på beskadiget hud, åbne sår eller ved hudinfektion uden sundhedsfaglig vurdering
- Produktet er ikke beregnet til medicinsk behandling eller terapeutisk kompression
- Må ikke anvendes, hvis produktet er beskadiget, væsentligt slidt eller har defekte lukninger

5. Brugsanvisning

5.1 Før brug

- Kontroller, at støtte-BH'en er ren og intakt
- Vælg korrekt størrelse for optimal pasform og komfort
- Læs denne brugsanvisning inden første anvendelse

5.2 Påtagning

- Åbn alle lukninger (trykknapper)
- Placer BH'en korrekt omkring overkroppen
- Luk evt. trykknapper i korrekt rækkefølge
- Sørg for, at BH'en sidder støttende, men ikke stramt

5.3 Under brug

- Produktet kan anvendes i dagligdagen efter behov
- Ved ubehag, smerter eller hudirritation skal brugen ophøre

5.4 Aftagning

- Åbn evt. trykknapper forsigtigt
- Fjern støtte-BH'en uden at belaste hud eller skuldre

6. Rengøring og vedligeholdelse

- Vaskes i henhold til vaskeanvisningen på produktets mærkat.
- Produktet skal være helt tørt før genbrug eller opbevaring.
- Inspicer regelmæssigt for slid på stof, sømme og trykknapper.

7. Advarsler og forholdsregler

- Anvend altid korrekt størrelse
- Produktet må ikke anvendes ved beskadigede trykknapper eller sømme
- Fortsat brug af slidt produkt kan nedsætte støtte og komfort
- Produktet må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse

Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning